

Guide de la plateforme TRP-Platform-MK2

Avant l'usage

- Retirez tous les emballages et assurez-vous que le produit n'a pas été endommagé.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez les instructions for référence
- Sur chaque produit, vous trouverez une étiquette indiquant la charge maximale autorisée.

Pièces fournies

- Cadre de la Plate-forme (fig1), Plate-formex1 (fig 2), Bords surélevés x4 & fixations (fig 3), Pieds de support avec kit d'extension x4 (fig 4).

Fig.1



Fig. 2



Fig.3



Fig.4



Assembler

1. Ouvrez le cadre de la plate-forme (fig.5) et fixez les pieds à la hauteur souhaitée en utilisant le kit d'extension si nécessaire (fig.6,6a). Serrez les pieds dans le cadre (fig. 7).
2. Une fois réglées à la bonne hauteur, serrez solidement toutes les fixations des pieds de support avec une clé (clé non fournie) (fig. 8)
3. Placez le cadre dans la bonne position (fig.9), utilisez des goupilles de fixation pour verrouiller le cadre ensemble (fig.10).
4. Ouvrez maintenant la plate-forme et placez-la sur le dessus du cadre (fig. 11).
5. Fixez les bords de sécurité à l'aide des fixations fournies (fig. 12)
6. Positionnez la plate-forme et les rampes peuvent maintenant être mises en place (fig. 13).

Fig. 5



Fig. 6



Fig. 6a



Fig. 7

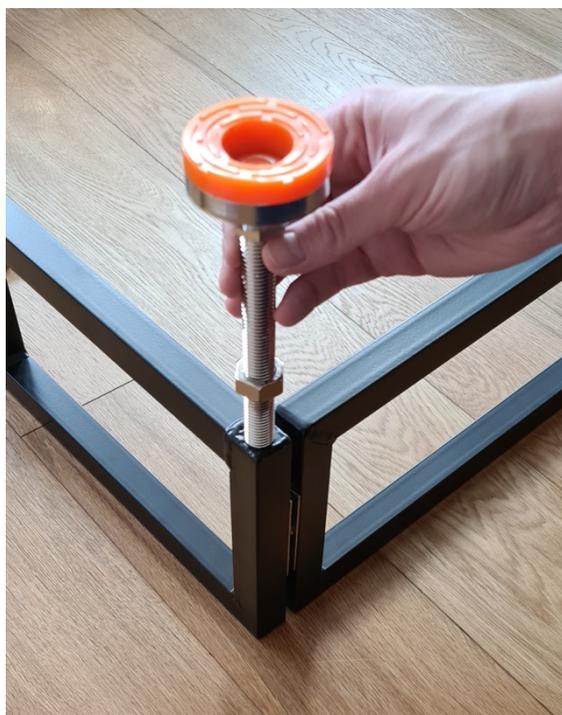


Fig. 8

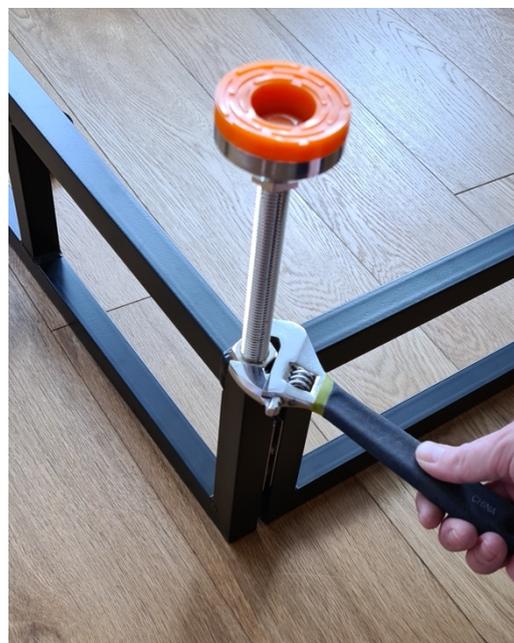


Fig. 9



Fig. 10

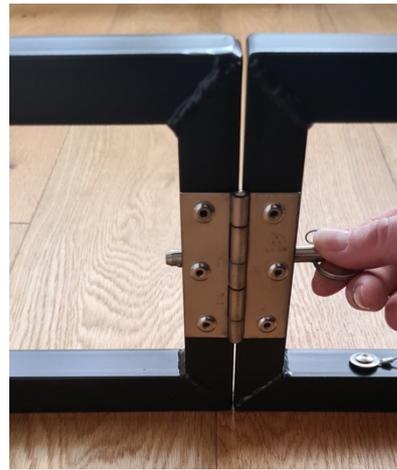


Fig. 11



Fig. 12

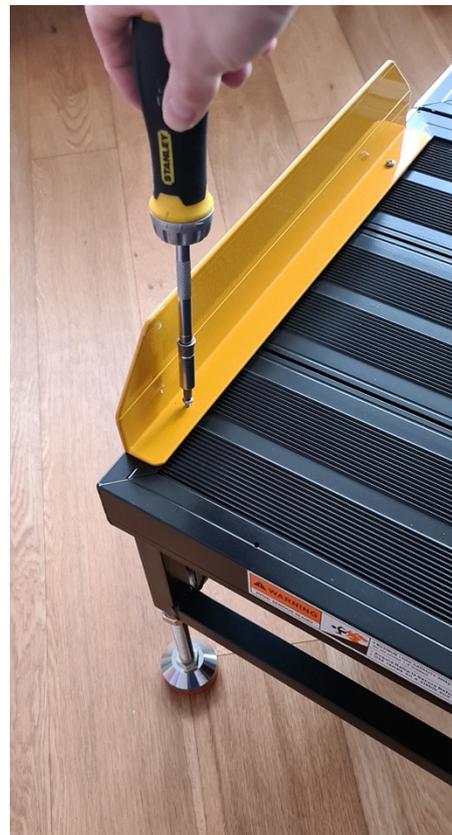


Fig. 13



Maintenance

- Si le produit est endommagé de quelque manière que ce soit, il ne doit pas être utilisé (contacter le fournisseur / le fabricant).
- Le produit peut être nettoyé avec des produits de nettoyage normaux et laissé sécher avant utilisation.

Garantie

Rampes Directes garantit que la rampe / l'accessoire est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie restera en vigueur pendant un an à compter de la date d'achat originale par le consommateur. Toutes utilisations autres que celles publiées / prévues annuleront la garantie. La garantie sera anulée si l'endommagement est causé par une utilisation déraisonnable. Au cas où il serait nécessaire de renvoyer la rampe, il est essentiel que celle-ci soit emballée de manière adéquate pour la protéger pendant le transport, de préférence dans sa boîte d'origine; sinon, Rampes Directes n' accepte pas la responsabilité pour les endommagements causés par le transit. Dans certains cas, les articles seront fournis par un de nos distributeurs, veuillez conserver la facture originale. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.

The TRP-WR-JS fait partie de notre gamme de produits. Pour voir la gamme complète s'il vous plaît visitez notre site Web www.rampes-directets.fr

Ou contactez-nous via, courrier, email et / ou téléphone.

Rampes Directes
27 Avenue Du Savoy
74400 Chamonix-Mont-Blanc

Tel: (+33) 4 26 83 83 73 20
Email: bonjour@rampes-directes.fr
www.rampes-directes.fr